

DENAA + Tool Cleaner

Le nettoyant pour instruments médicaux



Le nettoyant pour instruments médicaux DENAA+ Tool Cleaner est la solution efficace pour un nettoyage en profondeur. Ce nettoyant pour instruments est naturel et permet de maintenir un environnement sain. Il est composé de micro-organismes qui permettent un nettoyage efficace. La formule unique du DENAA+ Tool Cleaner élimine tous les déchets organiques présents avant l'autoclavage. Du coup, les instruments sont stériles et propres !



Nettoyage en profondeur
Élimine les déchets organiques
N'attaque pas le métal
Agréable et sûr pour le patient
Rapidement biodégradable

Effigy'nov

Les produits DENAA+ sont **des solutions biotechnologiques** composées de probiotiques et d'ingrédients écologiques. Ils **optimisent et espacent les opérations de nettoyage**, en nettoyant efficacement et en profondeur. Ils éliminent les matières organiques pouvant être associés à des infections bactériennes.

Nos produits sont biodégradables et sans danger pour les utilisateurs et le public. Ils sont certifiés et contrôlés par des laboratoires accrédités et conformes au règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents.

Ils préservent l'environnement par l'utilisation de ressources naturelles à forte biodégradabilité, améliorant ainsi la qualité des rejets dans les eaux usées et grâce à des emballages en plastique recyclable.

Utilisation :

Nettoyage des instruments médicaux.

Produit concentré : Concentration d'utilisation recommandée : dilution 1 : 10, 50mL dans 500 ml d'eau. Immerger complètement les instruments pendant 24 heures. Ensuite, rincer abondamment à l'eau tiède et réaliser normalement l'opération de stérilisation en autoclave.

Mode d'emploi :

Secouer avant emploi. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Éviter le contact avec les yeux. Conserver dans un endroit sec entre 10°C & 30°C et hors de la portée des jeunes enfants.

	Caractéristiques techniques
Composition	Eau, mélange bactérien de Bacillus, Alcools C12-14 (éthoxylé), sulfates, sel de sodium, acide citrique, parfum de citron
Aspect	Liquide de couleur bleu à l'aspect visqueux
Critères du contrôle qualité	Densité à 30° : environ 1.01 g/l – pH 4.0 - 5.0 – pH de la solution à 1% : 4.0 - 5.0 – Contenance en eau : min 60% - Statut microbiologique : >1x10 ⁶ UFC/ml
Conditionnement	Code 501401 : Produit concentré en Bidon de 5 L avec bouchon doseur – Unité de vente : Carton de 4 unités



18 Allée du Parc Saint Georges - 53960 BONCHAMP – France
Tél : 06 61 50 82 75 - E-mail : yves.vieillescazes@effigy-pro.com
www.effigy-pro.com

Des solutions innovantes pour les professionnels de l'hygiène